

VITAL RAYS



МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
«ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД»

VITAL RAYS

8 800 500 88 18
WWW.VITAL-RAYS.RU

EAC CE

ПРОИЗВЕДENO / PRODUCED:
ZHEJIANG EASYWAY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD
ADDRESS: BUILDING 12, NO. 355 BINHAI TWELVE
BRANCH ROAD, WENZHOUJIAN NEW DISTRICT,
WENZHOU, 325000, CHINA
ПО ЗАКАЗУ / BY ORDER:
ООО «ВИТАЛ РАЙС» / VITAL RAYS, LLC
АДРЕС / ADDRESS: 250012, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
Г. КРАСНОДАР, УЛ. КИРГЕЗКАЯ, Д. 26 / 250012,
RUSSIAN FEDERATION, KRASNODAR,
KIRGIZYVAYE STR., 26



Руководство пользователя



Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»! Перед использованием массажера для глаз «Ясный взгляд» внимательно изучите данное руководство и соблюдайте все необходимые меры предосторожности. В руководстве по эксплуатации описано, как Вы можете безопасно и эффективно использовать устройство. Пожалуйста, сохраните его после прочтения.

Обратите внимание!

Изображения, приведенные в данном руководстве, основаны на внешнем виде стандартной модели массажера. Они приведены исключительно для иллюстрации описываемой информации. Реальный внешний вид изделия может отличаться от изображения. Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид, цвет и иные характеристики устройства.

Пожалуйста, не используйте массажер с макияжем лица. Массаж повредит макияж, кроме того, косметика загрязнит кожу. Перед использованием рекомендуется очистить лицо.

Пожалуйста, используйте это оборудование в температурном диапазоне от 10 °C до 35 °C и храните в температурном диапазоне от - 20 °C до 45 °C. Слишком низкая или высокая температура окружающей среды может привести к некорректной работе оборудования.

Не используйте массажер во время вождения автомобиля, чтобы избежать несчастных случаев из-за помех для зрения.

Не используйте массажер вблизи источников воды или огня.

Ни в коем случае не разбирайте изделие самостоятельно. В случае выявления сбоев в работе устройства, пожалуйста, обратитесь к продавцу или в официальный сервисный центр.

Не подключайте и не отключайте зарядный кабель USB мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током и возникновения несчастных случаев.

Перед использованием рекомендуется консультация специалиста по имеющимся острым или хроническим заболеваниям во избежание возникновения осложнений.

Перед использованием убедитесь, что в глазах нет контактных линз, а также снимите заколки и украшения для волос.

При наличии аллергического дерматита лица или повышенной чувствительности кожи, пожалуйста, используйте этот продукт с осторожностью и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом. В случае возникновения дискомфорта во время использования прибора, пожалуйста, немедленно прекратите использование.

Не используйте устройство для других целей, кроме массажа, описанного в руководстве пользователя, чтобы избежать несчастных случаев и сбоев в работе прибора.

Массажер имеет функцию прогрева. Пожалуйста, будьте осторожны, если у вас повышенная термочувствительность.

В массажере присутствует силикон. При наличии аллергии, пожалуйста, не используйте прибор.


Устройство работает на литиевой батарее. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не бросайте его в огонь во избежание возникновения несчастных случаев.

При утилизации прибора учитывайте соответствующие правила охраны окружающей среды.


Технические характеристики

Наименование продукта	Массажер для глаз «Ясный взгляд»	Модель	HXR-P060
Размеры	190x72x71мм	Потребляемая мощность	6Вт
Емкость батареи	3,7В 1200мА/ч	Напряжение	5Вt ~ 2А
Вес изделия	210 г	Тип разъема зарядного устройства	USB Type-C

Комплектация

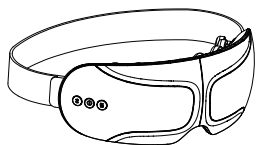


Массажер для глаз

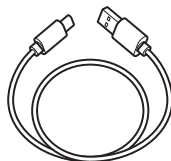

Зарядный кабель USB Type-C




Руководство пользователя

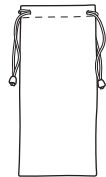


Защитный чехол

Наименование частей аппарата

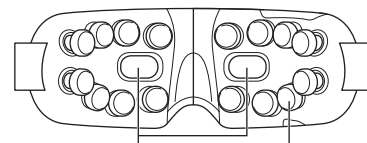

Отверстия для глаз

Силиконовые массажные головки (16 шт.)

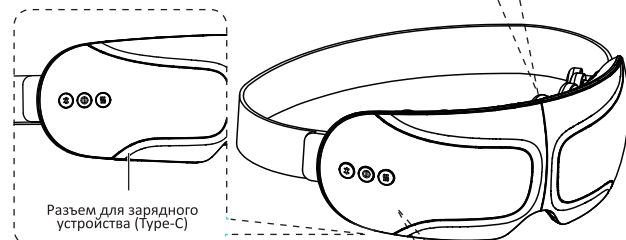

Разъем для зарядного устройства (Type-C)

Индикатор Bluetooth



Индикатор режима нагрева

Индикатор питания



Кнопка Bluetooth





Кнопка включения и переключения режимов



Кнопка нагрева

Использование прибора

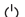Для включения массажера нажмите и удерживайте кнопку (). Индикатор загорится.

Короткое нажатие кнопки () изменяет режим массажа. По умолчанию запускается режим релаксации и функция нагрева.

Устройство включает пять режимов массажа:

Режим релаксации

Включает функцию вибромассажа, прогрев инфракрасным теплом и музыкальное сопровождение.

Режим красоты

Включает функцию вибромассажа, прогрев инфракрасным теплом и музыкальное сопровождение.

Режим сна

Включает функцию вибромассажа, прогрев инфракрасным теплом и музыкальное сопровождение.


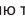
Комплексный режим


Включает функцию вибромассажа, прогрев инфракрасным теплом и музыкальное сопровождение.


Режим тепловой терапии

Включает прогрев инфракрасным теплом без вибромассажа и музыкального сопровождения.

Короткое нажатие кнопки () включает/выключает музыку

Короткое нажатие кнопки () включает/выключает функцию тепла. Кнопка () не работает в «Режиме тепловой терапии».


Длительное нажатие кнопки () включает функцию Bluetooth. Название Bluetooth устройства для подключения: 3D EYE MAGIC TAPPING.

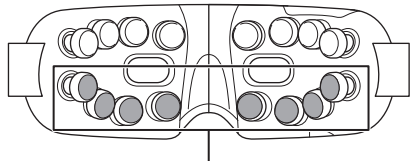

Время работы аппарата по умолчанию составляет 15 минут.

Если вам нужно продлить время работы, включите массажер снова.


Рекомендации по использованию

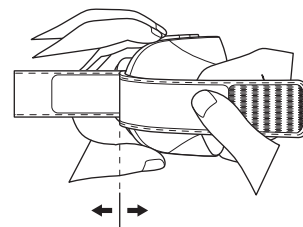

Зарядка устройства

Если прибор используется впервые или не использовался в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите его следующим образом:

1. Подключите USB-кабель к зарядному гнезду в нижней левой части массажера.
2. Вставьте USB-кабель в адаптер питания и подключите питание.

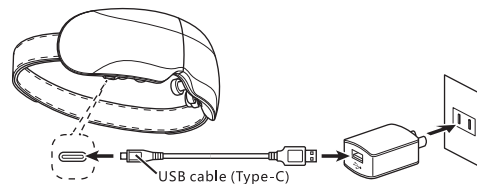

3. Для полной зарядки массажера требуется 2,5-3 часа.
4. Пожалуйста, отключите блок питания после того, как массажер будет полностью заряжен.

Во время работы массажера, если батарея заряжена более, чем на 30%, индикатор горит синим светом, если менее, чем на 30% - горит красным светом, если заряд приближается к минимальному - мигает красным светом.

Во время зарядки индикатор может мигать или гореть непрерывно - в зависимости от уровня заряда аккумулятора.

ВАЖНО: использование массажера во время зарядки невозможно.

Выявление и устранение неисправностей

Возможные неполадки	Возможные причины / способы устранения
Массажер не включается нажатием кнопки включения	Пожалуйста, убедитесь, заряжено ли устройство.
	Пожалуйста, проверьте, правильно ли вы включаете устройство (нажмите и удерживайте клавишу более 1 секунды).
Устройство не заряжается или быстро разряжается	Такое может происходить при повышенной или пониженной температуре окружающей среды. Пожалуйста, зарядите и используйте прибор при температуре 10-35 °C.
	Пожалуйста, проверьте, достаточно ли плотно подсоединены кабель USB и адаптер питания.
	При первой зарядке или длительном перерыве в использовании, пожалуйста, зарядите батарею на 100% перед применением массажера.
Прибор отключился во время использования	Зарядка невозможна во время работы прибора. Пожалуйста, выключите питание перед зарядкой.
	Устройство автоматически перестанет работать через 15 минут после начала использования. Если вы хотите продлить сеанс массажа, выключите прибор снова.
Проблема сопряжения Bluetooth	Пожалуйста, проверьте, не разряжен ли массажер. Если аккумулятор разряжен, пожалуйста, зарядите его перед использованием.
	Пожалуйста, убедитесь, что расстояние между массажером и устройством, сопряженным с ним по Bluetooth, составляет менее 1 метра.
	Пожалуйста, убедитесь, что функция Bluetooth массажера и второго устройства включена и работает нормально.
Нет звука после подключения Bluetooth	Для настройки Bluetooth, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства пользователя.
	Попробуйте увеличить громкость устройства, сопряженного с массажером по Bluetooth.
Сбой в звуковом сопровождении / Обрыв связи Bluetooth	Пожалуйста, убедитесь, что между массажером и устройством, сопряженным с ним по Bluetooth, нет препятствий и что они находятся достаточно близко друг к другу.
	Пожалуйста, уменьшите громкость устройства, сопряженного с массажером по Bluetooth.
	Проверьте, не располагаются ли рядом микроволновая печь, беспроводной маршрутизатор, телевизор, радио и другие приборы, которые могут помешать сигналу Bluetooth.
	Пожалуйста, выключите и включите Bluetooth снова.
	Пожалуйста, убедитесь, что массажер находится рядом с устройством, сопряженным с ним по Bluetooth.
	Убедитесь, что массажер и устройство, сопряженное с ним по Bluetooth, полностью заряжены.

*Примечание: Если проблема не устраняется после выполнения вышеуказанных шагов, пожалуйста, отключите питание и обратитесь в службу поддержки клиентов.

Хранение и уход

● Уход за массажером

1. Обязательно отсоединяйте кабель питания перед очищением массажера.
2. Не используйте моющие средства, бензин или другие химические вещества для очищения прибора.
3. Если прибор загрязнен, его можно протереть сухой мягкой тканью или влажной салфеткой. Ни в коем случае не мойте прибор водой или другими жидкостями.
4. После каждого использования, пожалуйста, очищайте массажные головки. Если массажные головки сильно загрязнены, протрите их спиртовой влажной салфеткой.
5. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно, чтобы избежать несчастных случаев или поломок. При возникновении неисправностей обратитесь в официальный сервисный центр.

● Хранение массажера

1. Всегда отключайте блок питания массажера.
2. Пожалуйста, не храните прибор во влажном месте или в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей.
3. Если массажер не используется в течение длительного времени, пожалуйста, полностью зарядите его и положите в чехол для хранения, а затем поместите его в сухое и проветриваемое место, защищенное от прямых солнечных лучей.
4. Не храните устройство в доступном для детей и животных месте.
5. Не складывайте устройство для хранения. Длительное нахождение в сложенном состоянии может повредить массажер.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Сервисное обслуживание прибора производится в соответствии с выданным при покупке Гарантийным талоном.

